

## Implantes de pectoral

Implantes rellenos de gel de silicona disponibles en formas anatómicas para músculo de pectoral derecho e izquierdo



Pectoral izquierdo



Pectoral derecho

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



**POLYTECH**  
health & aesthetics 

# Implantes de pectoral, C€ 0483

## Descripción del producto

Los implantes de pectoral rellenos de gel de silicona están disponibles en forma oval y con superficie MESMO® (micro-texturizada) y POLYsmooth™ (lisa). Son usados para el aumento estético o para la reconstrucción en deficiencias del tejido blando.

Debido al stress más alto que deben soportar estos implantes, ha sido escogido un gel más firme en comparación con los implantes mamarios. Para facilitar su inserción se ha colocado un parche fijado en la media distal del implante.

Los implantes de pectoral son de un único lumen y están disponibles en tres tamaños y a su vez diferenciados para cada lado del pecho.

## Información de los materiales

La cubierta de los implantes de pectoral, similar a la de los implantes de glúteo, consiste en una fuerte, resistente y altamente elástico elastómero de silicona con una barrera de seguridad en su interior. Los implantes están rellenos de un gel de silicona de alta cohesividad.

La fabricación de los implantes esta basada en los estándares de calidad de acuerdo con las normativas ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de una alta calidad médica.

## Instrucciones de uso

Los implantes de pectoral son usados tanto en cirugía estética como en cirugía reparadora. La técnica de introducción es normalmente axilar, con el paciente en posición supina, el brazo en 90º para tener el músculo levantado. Los implantes podrán colocarse por debajo del músculo.

## Indicaciones

- Aumento estético
- Corrección del contorno
- Reconstrucción, p. ej. después de un traumatismo
- Síndrome de Poland
- Recambio de implante

## Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

**ATENCIÓN:** Siga las instrucciones detalladas de uso incluidas con cada producto.


## Implantes de pectoral

Rellenos de gel de silicona, con superficie lisa o micro-texturizada, embalaje individual y estéril, C€ 0483

Nº de pedido		Volumen (ml)	Dimensiones (cm)		
POLYsmooth®	MESMO®		A	B	C
10500-190R	15500-190R <sup>1</sup>	192	14,7	10,2	2,4
10500-190L	15500-190L <sup>1</sup>	192	14,7	10,2	2,4
10500-230R	15500-230R <sup>1</sup>	231	16,0	10,7	2,7
10500-230L	15500-230L <sup>1</sup>	231	16,0	10,7	2,7
10500-300R <sup>1</sup>	15500-300R <sup>1</sup>	301	16,9	11,6	2,9
10500-300L <sup>1</sup>	15500-300L <sup>1</sup>	301	16,9	11,6	2,9

R = derecha; L = izquierda

Medidas aproximadas

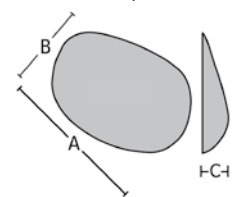


En inventario <sup>1</sup> Entrega ≈ 6 semanas después de la orden


Incisión



Posicionamiento e introducción

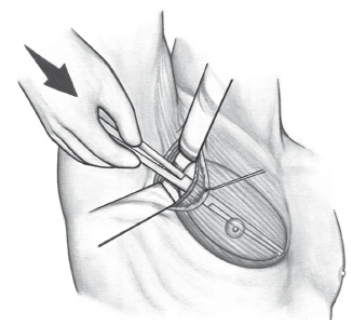

Resultado final

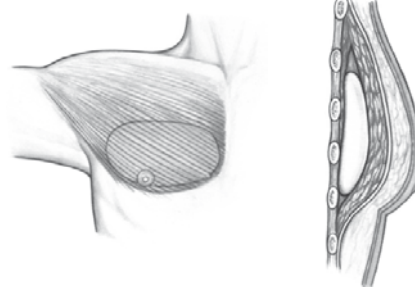

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.es